


## トルリシティ®皮下注0.75mgアテオス®をお使いの方へ

## 取り外したキャップをご確認ください

トルリシティ皮下注0.75mgアテオスにおいて、まれにキャップが正しく外れない場合があります。以下をご注意くださいますようお願いいたします。

## キャップを外した時に

取り外したキャップに、針カバー(プラスチックで覆われた黒いゴム)があることを確認してください。

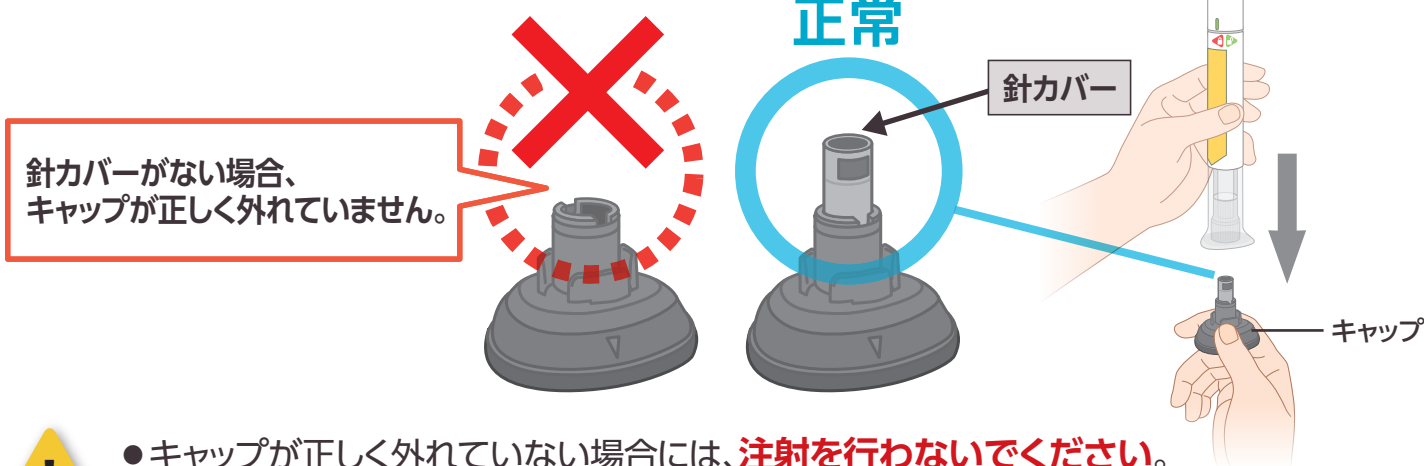


- キャップが正しく外れていない場合には、**注射を行わないでください。**
- 注入器本体に針カバーが残っていても、**取り外さないでください。**
- 不具合品は受け取った医療機関へお持ちください。

なお、キャップは投与直前に取り外してください。

一度取り外したキャップは付けなおさないでください。針を破損させる原因になります。

キャップが正しく外れていない製品の  
注入ボタンを押してしまったら...

- 針が皮膚に刺さっておらず、**薬液は注入されていません。**主治医にご相談ください。
- 底面に針カバーが見えますが、それを**取り外さないでください。**取り外すと、注射針が露出し、薬液が勢いよく出てきます。

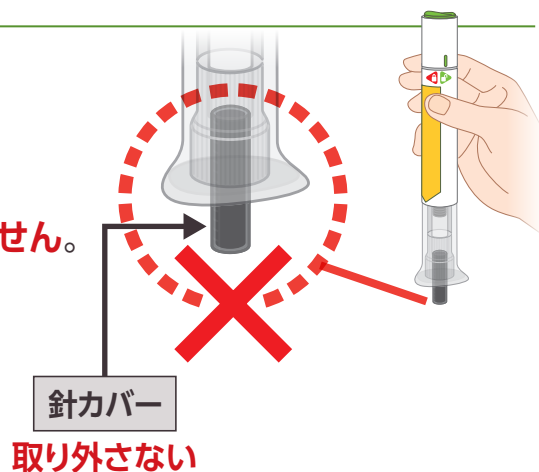

ご質問等は、主治医にご相談いただくか、下記までお問合せください。

販売元

大日本住友製薬株式会社

くすり情報センター

TEL 0120-885-736<sup>※1</sup>

受付時間：月曜日～金曜日9:00-17:30<sup>※2</sup>

製造販売元

日本イーライリリー株式会社

Lilly Answers リリーアンサーズ

TEL 0120-245-970<sup>※1</sup>

受付時間：月曜日～金曜日8:45-17:30<sup>※2</sup>

時間外お問合せ窓口(注入器に関するお問合せのみ受付)

TEL 0120-245-970<sup>※1</sup>

受付時間：平日17:30-22:00、土曜日・祝祭日8:45-22:00  
(日曜日は受け付けておりません)

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 ※2 祝祭日および当社休日を除きます。