

医療従事者の皆様へ

トルリシティ®皮下注0.75mgアテオス® 「リキャップ」防止のお願い

一度取り外した
灰色のキャップを
付け直さない

灰色のキャップを付け直すと、
針が破損することがあります。
キャップは、
外したらすぐに捨ててください。

! 灰色のキャップを外すと、
無菌状態ではなくなります。
キャップは、投与直前に
外してください。

灰色のキャップ

GOOD DESIGN AWARD 2015
グッドデザイン金賞

持続性GLP-1受容体作動薬 薬価基準収載

トルリシティ® 皮下注 0.75mg アテオス®

デュラグルチド(遺伝子組換え)注射液 TRULICITY® ATEOS®

生物由来製品 劇薬 処方箋医薬品(注意-医師等の処方箋により使用すること)

医療関係者向け製品情報サイトはこちら

www.diabetes.co.jp/hcp/tlc/



スマートフォンでも

臨床成績など製品に関する情報のほか、患者さん向け資料のダウンロードもできます。

トルリシティ®皮下注0.75mg アテオス®
使い方ガイド

冊子



動画



トルリシティ®皮下注0.75mg アテオス®
で始める2型糖尿病治療

冊子



販売元(資料請求先)

大日本住友製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町 2-6-8

【製品に関するお問合せ(医療関係者向け)】

くすり情報センター

TEL 0120-034-389※1

受付時間:月曜日～金曜日9:00-17:30※2

【医療情報サイト】<https://ds-pharma.jp/>

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 ※2 祝祭日および当社休日を除きます。

製造販売元(資料請求先)

日本イーライリリー株式会社

〒651-0086 神戸市中央区磯上通 5-1-28

【製品に関するお問合せ(医療関係者向け)】

Lilly Answers リリーアンサーズ

TEL 0120-360-605※1

受付時間:月曜日～金曜日8:45-17:30※2

www.lillymedical.jp